
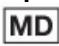




Wiedent

PL 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 187/189
tel. +48 42 640 48 70, fax +48 42 688 33 84

Instrukcja używania tworzywa akrylowego
samopolimeryzującego do napraw protez i aparatów
ortodontycznych ESTETIC S  

Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej www.wiedent.com.pl w zakładce oferta/materiały akrylowe/Estetic S.

Przeznaczenie

Tworzywo akrylowe Estetic S to wyrób medyczny klasy I przeznaczony do wykonywania napraw ruchomych protez zębowych (całkowitych i częściowych) i aparatów ortodontycznych.

Opis

- tworzywo samopolimeryzujące,
- zgodne kolorystycznie z tworzywem do wykonywania płyt protez Estetic,
- spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20795-1.

Rodzaje tworzywa akrylowego Estetic S:

- Estetic S „10V” - różowe (odcień 10) z żyłkami
- Estetic S „10” - różowe (odcień 10) bez żyłek
- Estetic S „8V” - różowe (odcień 8) z żyłkami
- Estetic S „8” - różowe (odcień 8) bez żyłek
- Estetic S „0” - bezbarwne

Surowce użyte do produkcji

Tworzywo akrylowe Estetic S składa się z proszku – kopolimeru metakrylanu metylu i płynu – zawierającego monomer metakrylanu metylu, i N,N dimetylo-p-toluidynę.

Sposób postępowania

Zalecane proporcje wagowe proszek/płyn 2:1.

Do naczynia wlać odpowiednią ilość płynu i stopniowo dosypywać proszek aż do całkowitego nasycenia proszku płynem. Mieszać przez kilka sekund - roztwór powinien mieć **konsystencję gęstej śmietany**. Zamknąć szczelnie naczynie i pozostawić pod przykryciem na czas ok. 2 - 5 minut (w zależności od temperatury otoczenia). Wyższa temperatura przyspiesza polimeryzację, niższa opóźnia. Sprawdzić łopatką plastyczność - gdy uznamy, że tworzywo osiągnęło stadium największej plastyczności (jest to faza następująca tuż po fazie tzw. "ciągnących się nitek") należy przystąpić do nakładania. Plastyczne tworzywo rozprowadzić na przygotowanej do reperacji powierzchni i stopniowo prasować w puszcze polimeryzacyjnej. Polimeryzować w wodzie o temperaturze 40-50°C pod ciśnieniem 2 barów przez ok. 20 minut. Spolimeryzowaną protezę obrabiać i polerować ogólnie stosowanymi sposobami.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

Płyn łatwopalny, drażniący - unikać wdychania oparów i kontaktu ze skórą i oczami. W razie kontaktu spłukać obficie wodą, ewentualnie zgłosić się do lekarza okulisty. Nie wylewać resztek płynu do ujęć kanalizacyjnych. Ostrzega się protetyka przed wdychaniem pyłu podczas wykonywania prac protetycznych. Przy pracach tych zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej.

Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjenta następujących wskazówek:

- protezy zębowe należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów lub innych środków specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji protez,
- protez zębowych nie należy moczyć w substancjach silnie alkalicznych lub kwaśnych, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni,
- protezy zębowe, które uległy uszkodzeniu, może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog,
- należy okresowo sprawdzać dopasowanie protez zębowych.

Opakowania

Komplet:

- 100 g proszku, 50 ml płynu

Warunki przechowywania i transportu

W szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, w miejscach niedostępnych dla dzieci. Podczas przechowywania i transportu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Tworzywo akrylowe Estetic S trzeba zużyć w czasie nie dłuższym niż 5 lata od wyprodukowania.

Podstawa prawna

Tworzywo akrylowe Estetic S spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745.

Stosowane symbole



Wytwórca



Przestrzegać instrukcji używania



Znak zgodności wyrobu z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745



Ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania



Chronić przed światłem słonecznym



Produkt jest wyrobem medycznym



Nr serii



Termin ważności

